

Biatain® Silicone – Applikationshinweise




Was sind die Vorteile von Silikon in der Wundversorgung?

- › Eine Silikonhaftung ist hautfreundlich und reduziert Hautirritationen.
- › Die Haut wird beim Verbandwechsel nicht beschädigt.
- › Silikon ist für jeden Hauttyp geeignet, auch bei Patienten mit brüchiger oder fragiler Altershaut.
- › Silikon bietet einen sicheren Halt ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht dadurch einen atraumatischen Verbandwechsel.




Beachten Sie bitte diese Hinweise beim Applizieren von Biatain® Silicone

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Haut gereinigt und trocken ist.
- 2 Verwenden Sie **keine** Cremes, Lotionen oder Hautpflegemittel. Diese reduzieren die Haftfähigkeit des Silikons.
- 3 Entfernen Sie zuerst die mittlere Trägerfolie und applizieren Sie den Verband mittig auf der Wunde. Im nächsten Schritt entfernen Sie vorsichtig nacheinander die beiden Seitenlaschen und befestigen so den Verband vollständig an der Wundumgebung.
- 4 Fahren Sie mit den Fingern vorsichtig über den Hafttrand, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- 5 Das Produkt sollte gewechselt werden, wenn sich das Exsudat sichtbar dem Rand des Schaumstoffs nähert oder spätestens nach 7 Tagen. Den selbsthaftenden Rand lösen, bevor das Produkt von der Wunde abgehoben und entfernt wird.

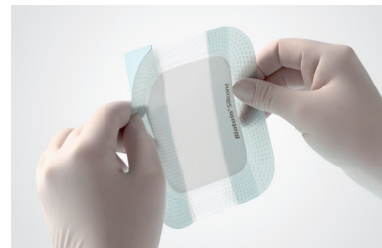

Hier geht's zum
Anwendungsvideo

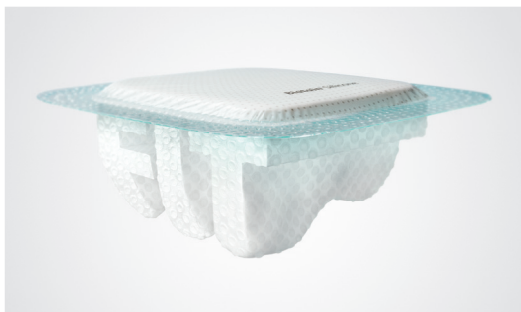

Den Hohlraum schließen – Biatain® Silicone mit der einzigartigen 3DFit Technologie®

Dank der 3DFit Technologie® wölbt sich Biatain® Silicone unter Exsudataufnahme bis zu 2 cm in Richtung Wundgrund. Das bedeutet, dass bei bis zu 80% der Wunden auf einen zusätzlichen Wundfüller verzichtet werden kann.¹

1. Braunwarth, H., Forster, J., Schmitt, M., Bieber, R., Kruschwitz, S., Wound depth and the need of a wound filler in chronic wounds. Poster auf Wounds UK Annual Conference 2017, Harrogate.

Bestellinformationen

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03875348	334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	3343433
03879292	334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	3343533
11486000	33400	10 × 20	5,5 × 15,5	5	3340003
11486017	33401	10 × 30	5,5 × 25,5	5	3340103
11486075	33408 Multishape	14 × 19,5	7,5 × 12,1	5	3340803
03879702	334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	3343633
03879731	334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	3343733
03880585	334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	3343833

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11486023	33404 Sakrum	15 × 19	10,9 × 14	5	3340403
11486052	33405 Sakrum	25 × 25	17 × 17,2	5	3340503
11486069	33406 Ferse	18 × 18	14 × 13,2	5	3340603

Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11485986	33452	5 × 5	2,2 × 2,2	5	3345203
11485992	33453	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	3345303
03880639	334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	3344433
03880697	334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	3344533
03880705	334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	3344633

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03880711	396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	3963633
03880728	396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	3963733
13704518	39644	10 × 20	5,5 × 15,5	5	3964403
13704524	39645	10 × 30	5,5 × 25,5	5	3964503
03880734	396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	3963833
11033497	396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	396393
03880757	396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	396403


Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
13704607	39650 Sakrum	15 × 19	10,9 × 14	5	3965003
13704547	39651 Sakrum	25 × 25	17 × 17,2	5	3965103
13704530	39652 Ferse	18 × 18	14 × 13,2	5	3965203

 Leicht – Mittel

 Mittel – Stark

 Wasserfest

 Zuschneidbar

 Infiziert

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Col-Nr. 3910406/230N WP 282

Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg, Tel. 040 669807-77, Fax 040 669807-48, service@coloplast.com
www.coloplast.de The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2019-12. All rights reserved Coloplast A/S

 **Coloplast**