

Lokale Therapie in der Wundversorgung

Infizierte Wunde Mäßig – Stark 

WUNDBILD



BEHANDLUNGSZIEL

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu

+

Keimabtötung
Lokale Antiseptika, antimikrobielle Therapie

REINIGUNG

Wundspüllösung **Allrinse®**



Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Alginate Ag**



+

Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge

PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm


Biatain® Silicone Ag **Biatain® Ag nicht-/selbst-haftend**



PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm

Biatain® Alginate Ag **Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border oder Biatain® nicht-/selbst-haftend**



Nicht-infizierte Wunde Mäßig – Stark 

WUNDBILD



BEHANDLUNGSZIEL

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu

+


Keimreduktion
Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspüllösung

+

Gewebeaufbau
Wundruhe

REINIGUNG

Wundspüllösung **Allrinse®**



Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Fiber** oder **Biatain® Alginate**




+


Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge

PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm

Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border **Biatain® nicht-/selbst-haftend**

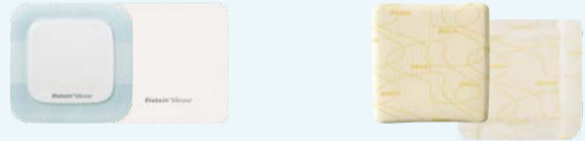

Biatain® Contact




+

Stark absorbierenden Sekundärverband

PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm

Biatain® Fiber oder Biatain® Alginate **Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border oder Biatain® nicht-/selbst-haftend**



Nicht-infizierte Wunde/Akutwunde Leicht 

WUNDBILD



BEHANDLUNGSZIEL

Exsudatmanagement
Optimal feuchtes Wundmilieu

+

Epithelisierung
Wundruhe / Gewebeschutz

REINIGUNG

Wundspüllösung **Allrinse®**



Zur Rehydrierung **Purilon® Gel**



PRODUKTEMPFEHLUNG

Biatain® Silicone Lite **Biatain® Contact**



Comfeel® Plus/Comfeel® Plus Transparent



Ostomy Care / Continenace Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology